

Gebruikershandleiding



Dank u!

Hartelijk dank voor de aanschaf van het SoClean 2 PAP-desinfectieapparaat*.

Deze handleiding bevat een productoverzicht en de belangrijkste instructies voor de instelling van het apparaat. Eenmaal aangesloten zult u ontdekken dat het dagelijks desinfecteren van uw PAP-apparatuur nog nooit zo eenvoudig is geweest. Het SoClean gepatenteerde proces vernietigt 99,9% van de PAP-ziektekiemen, bacteriën en andere pathogenen zonder water of agressieve chemicaliën. Met de SoClean 2 kunt u de gedesinfecteerde PAP-apparatuur dagelijks gebruiken, zonder dat u de stekker uit het stopcontact hoeft te halen om te desinfecteren.

De SoClean is ontworpen om op veel PAP-modellen te passen, maar voor sommige modellen zijn extra onderdelen of stappen nodig. Als u deze onderdelen momenteel niet heeft, kunt u ze bij SoClean of een erkende dealer kopen.

Raadpleeg SoClean.com voor PAP-modeldetails.

SoClean streeft naar het ontwikkelen van innovatieve en veilige manieren om de gezondheid en het welzijn van PAP-gebruikers te verbeteren. Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen via SoClean.com/contact.

*Zie indicaties voor gebruik, waarschuwingen en specificaties.

INHOUDSOPGAVE

INDICATIES VOOR GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN EN SPECIFICATIES	2
MEEGELEVERD MET UW SOCLEAN	4
SOCLEAN-BEDIENINGSPANEEL	8
BELANGRIJKE PAP-ONDERDELEN	10
AANSLUITSTAPPEN	12
ONDERSTEUNDE PAP-MACHINES EN -ADAPTERS	15
TAAL, KLOK EN DESINFECTIESCHEMA INSTELLEN	17
GEBRUIK VAN UW SOCLEAN	20
VERZORGING EN ONDERHOUD VAN UW SOCLEAN	22
VEELGESTELDE VRAGEN	22
UW GEZONDHEID EN OZONVEILIGHEID	24
CLASSIFICATIE, SYMBOLEN, FCC-KENNISGEVING	25

SoClean. 2

INDICATIES VOOR GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN EN SPECIFICATIES

Indicaties voor gebruik: De SoClean is een algemeen PAP-desinfectieapparaat, bedoeld voor gebruik thuis (PAP staat voor Positive Airway Pressure, positieve druk in de luchtwegen). Iemand die gebruik maakt van positieve luchtdruk voor de behandeling van obstructief slaapapneu kan de SoClean gebruiken om 99,9% van ziektekiemen en bacteriën op een PAP-apparaat te vernietigen of wanneer de gebruiker wilt genieten van het extra voordeel van een grondige desinectie van het PAP-systeem.

De SoClean wordt bevestigd aan een PAP-machine en werkt dagelijks terwijl het masker zich in de desinfectiekamer bevindt. De SoClean hoeft niet te worden losgekoppeld voordat de PAP-machine wordt gebruikt.

Contra-indicaties voor gebruik: Gebruik het SoClean-apparaat niet als een etherische olie wordt gebruikt in het PAP-waterreservoir of als sterk geurende schoonmaakmiddelen worden gebruikt om de PAP-apparatuur te desinfecteren. Wanneer er langs de rand van het masker acne of huiduitslag ontstaat, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

Gebruik dit product alleen op de manier zoals wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de apparatuur geboden veiligheidsbescherming worden aangetast.

DISCLAIMER: SoClean vertegenwoordigt door het gebruik van de termen desinfecteren, desinfectie of desinfectiemiddel in deze tekst of in andere documentatie een vernietigingspercentage van niet meer dan 99,9% van de bacteriën en ziektekiemen in een PAP.

Elektrische eigenschappen:

AC-adapteringang: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

AC-adapteruitgang: DC 12 V, 1,5 A Max

Stroomverbruik: 18 W max.

Omgevingseigenschappen:

Bedrijfstemperatuur: 10 tot 38 °C (50 tot 100 °F),
15% tot 70% luchtvochtigheid

Opslag- en vervoersomstandigheden:

-20 tot +55 °C (-4 tot 131 °F),
15% tot 70% luchtvochtigheid

Ozonconcentratie:

10 ppm per 5 min. gemeten op 1 cm van de uitgangsslang van de ozongenerator op het SoClean-apparaat, ervan uitgaande dat de ozonconcentratie bij aanvang < 0,3 ppm is voordat het SoClean-apparaat wordt ingeschakeld.

Fysieke eigenschappen:

Afmetingen: 20 x 18,42 x 22,54 cm (7,875 x 7,25 x 8,875 inch)

Gewicht: 2,54 kg (5,6 lbs)

Snoerlengte: 142 cm (4 voet en 8 inch)

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Let in het bijzonder op de uurinstelling bij gebruik van de 12-uurs modus. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

WAARSCHUWING: In het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat, zorg ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

WAARSCHUWING: Wijzig de slangdetectieschakelaar van uw SoClean-apparaat niet fysiek. Inspecteer de slangdetectieschakelaar regelmatig op schade of de onmogelijkheid om omhoog/omlaag te bewegen. Als de slangdetectieschakelaar op uw SoClean-apparaat defect is, kan de SoClean op een onverwacht tijdstip in werking treden.

WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet in contact komen met waterbronnen zoals regen, badkuipen, wasbakken en zwembaden. Gebruik een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Dompel het SoClean-apparaat niet onder in vloeistof en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Adem niet in door de slang en plaats geen levende wezens in de desinfectiekamer tijdens gebruik.

WAARSCHUWING: Niet te gebruiken in de nabijheid van explosieve omgevingen, gasdampen of andere brandbare stoffen, enz. Plaats geen brandbare of ontvlambare voorwerpen bovenop het SoClean-apparaat.

WAARSCHUWING: Houd het SoClean-deksel gesloten totdat het groene statuslampje brandt (ongeveer 2 uur na afloop van de desinfectiecyclus).

WAARSCHUWING: Haal het SoClean-apparaat niet uit elkaar.

WAARSCHUWING: Het SoClean-apparaat moet worden gebruikt volgens de procedures die in deze handleiding worden beschreven.


WAARSCHUWING: Ozon is een gasvormig desinfectiemiddel dat op natuurlijke wijze afbreekt nadat het is gevormd. Het SoClean-apparaat is ontworpen om ozon veilig in het systeem in te sluiten en heeft een katalysatorpatroonfilter in de desinfectiekamer om ozon weer om te zetten in zuurstof. In zeldzame gevallen kunnen mensen met ademhalingsgevoeligheden last hebben van irritatie. Mocht dit gebeuren, beëindig dan het gebruik en neem contact op met SoClean.

WAARSCHUWING: Doe geen neutraliserend voorwasmiddel in het PAP-reservoir. Het neutraliserende voorwasmiddel is alleen bedoeld voor het desinfecteren van uw PAP-apparaat.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de zwarte injectieslang aan de achterkant van de SoClean is aangesloten op uw PAP voordat u uw SoClean-apparaat gebruikt.

MEEGELEVERD MET UW SOCLEAN

Nummer	Onderdeelnaam	SKU	Beschrijving
1	Verwijderbare stop voor de slangopening	PN1214	Hiermee kunt u het SoClean-apparaat aan de rechter- of linkerkant van uw PAP-machine opstellen. Plaats deze in de slangopening die u niet gebruikt.
2	Desinfectiekamer	N.v.t.	Plaats hier uw masker in wanneer u wakker wordt. Sluit het deksel om ervoor te zorgen dat de dagelijkse desinfectiecyclus wordt uitgevoerd.
3	Dekselafdichting	PN1215	Zorgt voor een goede afdichting rond de desinfectiekamer wanneer het SoClean-deksel gesloten is. Sluit het deksel niet zonder dat dit onderdeel op zijn plaats zit.
4	SoClean-deksel	N.v.t.	Sluit het deksel nadat u uw masker heeft opgezet om ervoor te zorgen dat de automatische desinfectiecyclus wordt uitgevoerd.
5	Patroonfilter	PN1207	U kunt het samen met de terugslagklep kopen als onderdeel van het patroonfilterpakket. Dit patroonfilter zet ozon terug om in normale zuurstof. Verwijder de buitenste plasticfolie en de blauwe tape.
6	Neutraliserend voorwasmiddel (niet beschikbaar in alle landen)	PN1101	Het neutraliserende voorwasmiddel verwijdert elk materiaal of geur die zou kunnen reageren met ozon. Was uw PAP-apparatuur voordat u het SoClean-apparaat aansluit, of wanneer u een nieuw masker, slang of reservoir ontvangt.
7	Slangdetectieschakelaar	N.v.t.	De slangdetectieschakelaar detecteert wanneer het SoClean-apparaat is geconfigureerd voor gebruik door de aanwezigheid van de slang in de slangopening te detecteren wanneer het deksel gesloten is. Het SoClean-apparaat is zo ontworpen dat wanneer er geen slang in de opening is geplaatst, er geen desinfectiecyclus wordt uitgevoerd. De werking van de slangdetectieschakelaar kan worden geïnspecteerd door de grijze kunststof schakelaar voorzichtig omlaag te duwen en los te laten en te luisteren naar een hoorbare klik. De schakelaar moet vrij omlaag en omhoog kunnen bewegen wanneer deze voorzichtig wordt ingedrukt. Opmerking: Verwijder de afdichting niet uit de opening van de slangdetectieschakelaar.

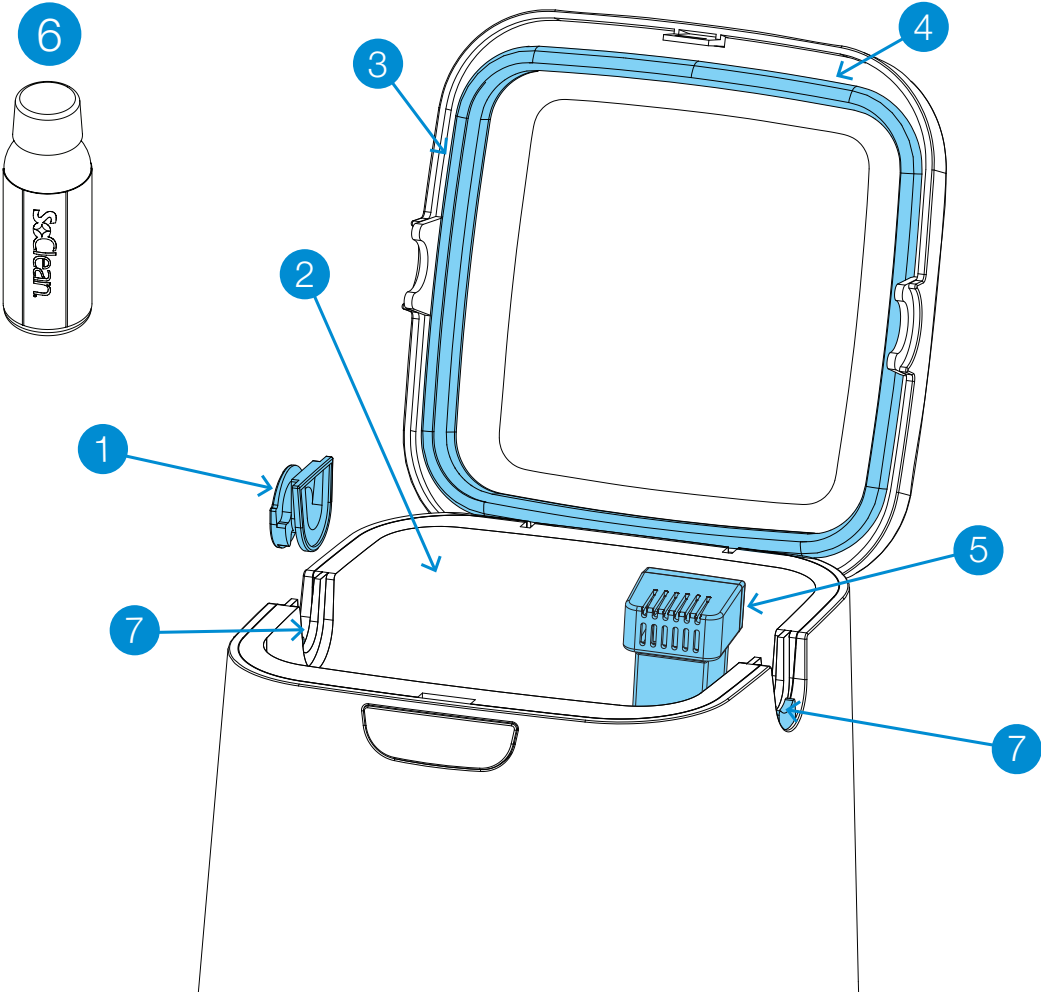

MEEGELEVERD MET UW SOCLEAN


Nummer	Onderdeelnaam	SKU	Beschrijving
8	Bedieningspaneel	N.v.t.	Knoppen, display en cyclusindicatielampje voor SoClean-functies. Zie pagina 8 voor details.
9	Injectieslang A & B	PN1104.12	De injectieslang A & B brengt ozon van het SoClean-apparaat naar de PAP-machine. Zie pagina 14.
10	Terugslagklep	PN1207	Dit onderdeel wordt vooraf geïnstalleerd in de injectieslang. U kunt het samen met het patroonfilter erbij kopen als onderdeel van het patroonfilterpakket. Het is een eenrichtingsterugslagklep die voorkomt dat er water van uw luchtbevochtigerreservoir in uw SoClean-apparaat terechtkomt. Als u water in de doorzichtige slang ziet, moet u de terugslagklep onmiddellijk vervangen.
11	Injectiekoppeling	PN1106 (luchtbevochtigingsreservoir) PN1116 (zonder luchtbevochtigingsreservoir)	Sluit de injectieslang A & B aan op uw PAP-machine. Zie pagina 13.
12	AC-adapter	PN1209	Voorziet uw SoClean-apparaat van stroom. Zie pagina 14.

Vervangingsonderdelen

U zult sommige SoClean-onderdelen regelmatig moeten vervangen als gevolg van normale slijtage en gebruik. Er wordt een melding weergegeven op uw SoClean na een bepaalde gebruiksduur (meestal rond de zes maanden) als geheugensteuntje voor het vervangen van het patroonfilter en de terugslagklep. Deze twee onderdelen worden besteld als een set met de naam patroonfilterpakket (PN1207).


Het neutraliserende voorwasmiddel is ook verkrijgbaar als u meer nodig heeft. U kunt ook een ander geur- en kleurstofvrij afwasmiddel gebruiken.

Als u benodigdheden wenst bij te bestellen, kunt u contact opnemen met uw erkende verkoper of een bezoek brengen aan **SoClean.com** en zoeken naar het gewenste onderdeel.

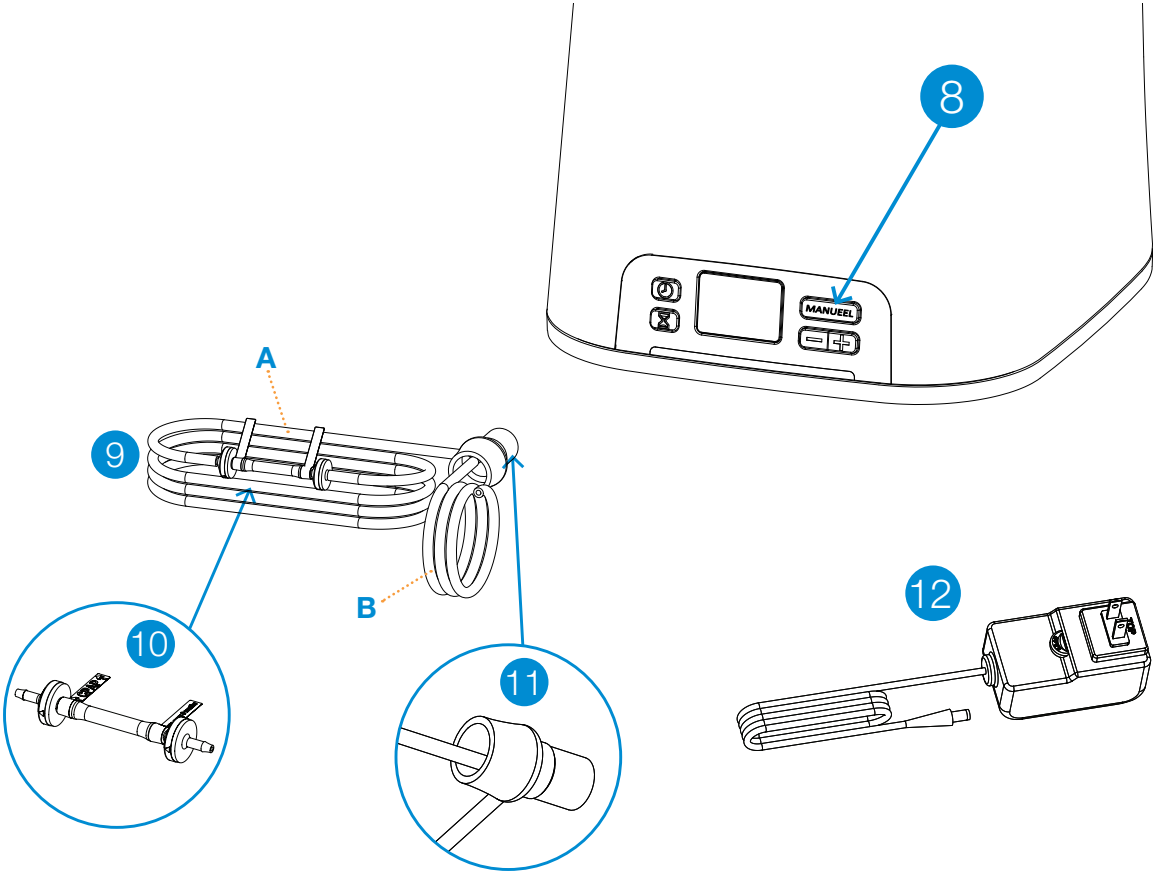

WAARSCHUWING: Koop uw patroonfilterpakketten alleen bij SoClean®. Originele patroonfilterpakketten kunnen worden gekocht bij SoClean via online marktplaatsen als Amazon® en eBay®, in aanvulling op SoClean.com. Verzekert u ervan dat de verkoper van uw patroonfilterpakket SoClean is, en niet een andere verkoper, om de echtheid van uw patroonfilterpakket te garanderen. SoClean heeft ontdekt dat er vervalste patroonfilterpakketten worden verkocht, met name op Amazon® en eBay®, met terugslagkleppen en filters die lekken en schade kunnen veroorzaken aan uw SoClean-apparaat of aan uw eigendommen. Neem onmiddellijk contact op met SoClean als u problemen hebt gehad met uw patroonfilterpakket. Amazon® is een geregistreerd handelsmerk van Amazon Technologies, Inc. eBay® is een geregistreerd handelsmerk van eBay, Inc. SoClean® is een geregistreerd handelsmerk van SoClean, Inc.

SOCLEAN-BEDIENINGSPANEEL

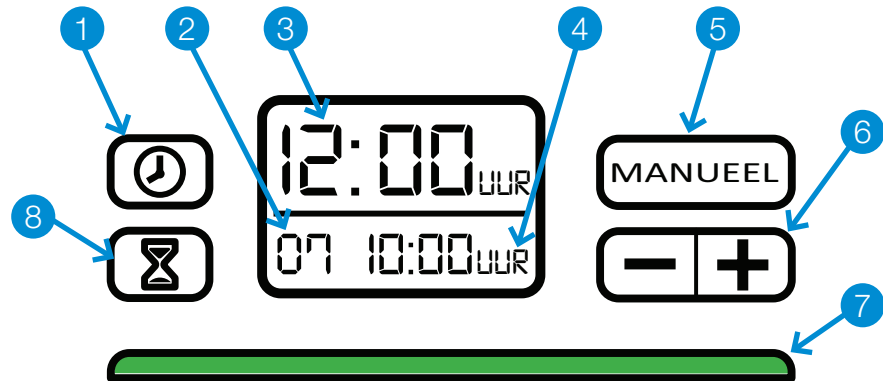

WAARSCHUWING: In het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat, zorg ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

Nummer	Knop(pen)/Display	Beschrijving
1		Stelt de klok in. Zie pagina 17.
2	Duur van desinfectiecyclus	De duur in minuten van de desinfectiecyclus. Zie pagina 18 om dit in te stellen. Standaard duur van desinfectiecyclus ingesteld op 7 minuten.
3	Huidige tijd	De huidige tijd. Zie pagina 17 om in te stellen. Standaardtijd ingesteld op 12:00 uur.
4	Dagelijkse starttijd van desinfectie	Het tijdstip waarop de dagelijkse desinfectiecyclus begint. Zie pagina 18 om het schema in te stellen. Standaard starttijd van de desinfectiecyclus ingesteld op 10:00 uur.
5		Start onmiddellijk een desinfectiecyclus. De geplande desinfectie zal nog steeds plaatsvinden. Zie pagina 19.
6		Verlaagt (-) of verhoogt (+) de tijd.

Nummer	Knop(pen)/Display	Beschrijving
7	Indicatorlampje	Het lampje onder het display geeft de status van de desinfectiecyclus aan. Zie pagina's 17, 18 en 19 voor instructies over planning en handmatige bediening. Een groen lampje geeft aan dat de desinfectie is voltooid en dat u uw PAP-masker uit de SoClean-desinfectiekamer kunt verwijderen en uw PAP-machine kunt gebruiken. ROOD – De SoClean werkt en genereert ozon. GEEL – De 2 uur durende desinfectiecyclus is nog steeds actief. De ozon werkt en verdampt. GROEN – De desinfectiecyclus is voltooid. U kunt uw PAP-machine te allen tijde gebruiken. Het lampje gaat uit wanneer u het deksel opent.
8		Stelt de dagelijkse starttijd van de desinfectie in. Zie pagina 18.
		Wijzigt de klok naar 24-uurs of 12-uurs notatie. Zie pagina 17.

Meldingen

Het SoClean-display toont meldingen die actie vereisen. In deze lijst worden de meldingen weergegeven en hoe u ze kunt corrigeren:

Melding	Wat te doen
Slang niet aanwezig. Cyclus wordt niet uitgevoerd.	Zorg ervoor dat de PAP-slang stevig in de slangopening zit. Controleer of de verwijderbare stop voor de slangopening goed op zijn plaats zit aan de andere kant. Zie pagina 20.
Het filterpakket bestellen.	Uw patroonfilter heeft het einde van zijn levensduur bereikt op basis van uw gebruik. Zie pagina 23.
Desinfectie wordt uitgevoerd. Open het deksel niet!	Ozon aanwezig. Het SoClean-apparaat is bezig met de desinfectie. Dit duurt ongeveer 2 uur. Het groene cyclusindicatielampje betekent dat de desinfectie voltooid is. U kunt nu het deksel openen, uw masker eruit halen en uw PAP-machine gebruiken.

BELANGRIJKE PAP- ONDERDELEN




Het SoClean-apparaat is ontworpen voor permanente aansluiting op uw PAP-machine en om beide producten te kunnen bedienen.

Het SoClean-apparaat wordt op de meeste PAP-machines aangesloten met behulp van de standaard meegeleverde onderdelen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderdelen van uw PAP-machine voor de aansluitingsprocedure beschreven. De figuur op de volgende pagina geeft deze belangrijke onderdelen weer.

Sommige PAP-machines hebben kenmerken die extra stappen of onderdelen vereisen. De adapters die nodig zijn om de SoClean met uw PAP te laten functioneren, bevatten de juiste instructies. Zie pagina 15 voor een lijst met beschikbare adapters voor specifieke PAP-machines.


Zie **SoClean.com** voor aanvullende instructies voor specifieke PAP-machines.

Dit zijn typische onderdelen van een PAP-machine waarnaar in de SoClean-aansluitingsprocedures wordt verwezen. Dit zijn slechts afbeeldingen, uw eigenlijke PAP-machine kan er anders uitzien dan deze tekeningen. Raadpleeg de documentatie die bij uw PAP-machine is geleverd voor een beter beeld van hoe deze onderdelen er uitzien.

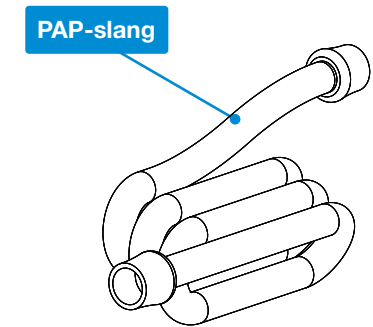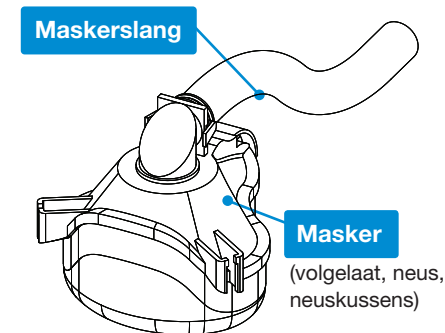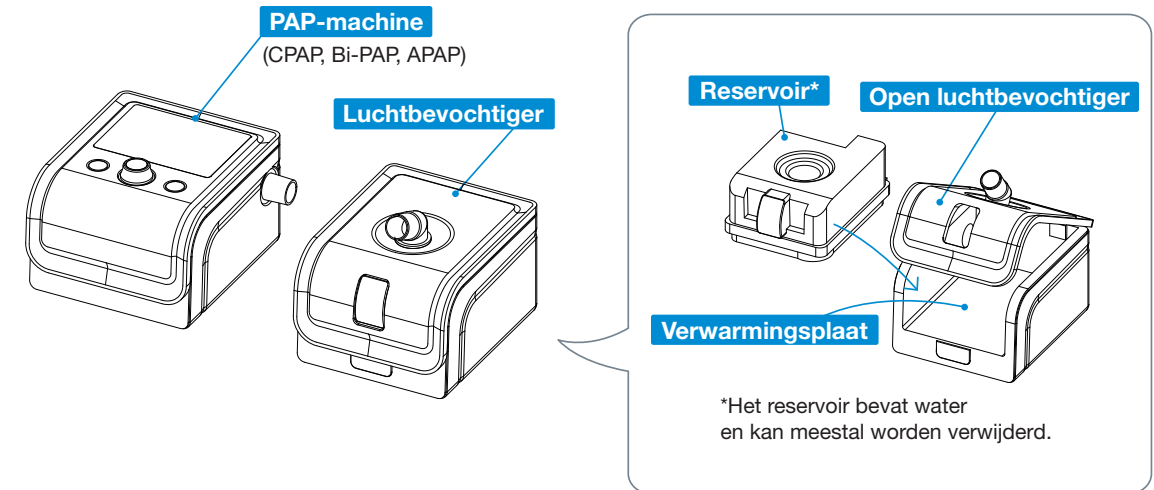

AANSLUITSTAPPEN

Na het volgen van deze stappen desinfecteert uw SoClean-apparaat uw PAP-machine dagelijks zonder los te koppelen. Kijk voordat u uw PAP-machine loskoppelt om de onderdelen te wassen eerst waar de PAP-slang is aangesloten. U dient de SoClean-injectiekoppeling weer aan te sluiten op hetzelfde punt.

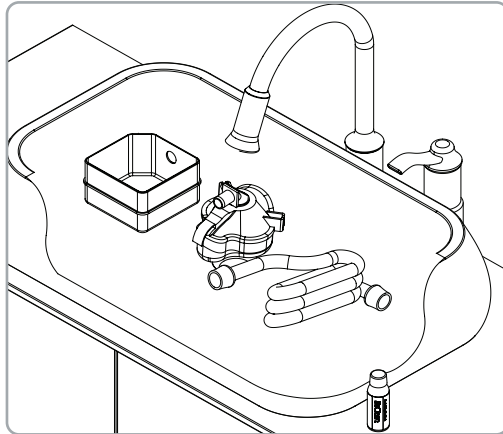

Figuur 1. Demonteren en wassen van uw PAP-apparaat


1. Voorwasprocedure van PAP-apparaat

Koppel uw PAP-masker, slang en reservoir los van de PAP-machine.


Gebruik twee dopjes van het bijgeleverde neutraliserende voorwasmiddel (wordt in sommige landen mogelijk niet meegeleverd) (geurvrij afwasmiddel kan ook worden gebruikt) met 4 liter water om uw PAP-apparatuur (masker, slang en reservoir) te wassen volgens de instructies van de fabrikant (figuur 1).

Grondig spoelen met schoon water.

Plaats het reservoir (indien gebruikt) weer in de PAP-machine. Bevestig de slang of het masker nog niet.

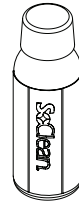

WAARSCHUWING: Doe geen neutraliserend voorwasmiddel in het PAP-reservoir. Het neutraliserende voorwasmiddel is alleen bedoeld voor het reinigen van uw PAP-apparaat.

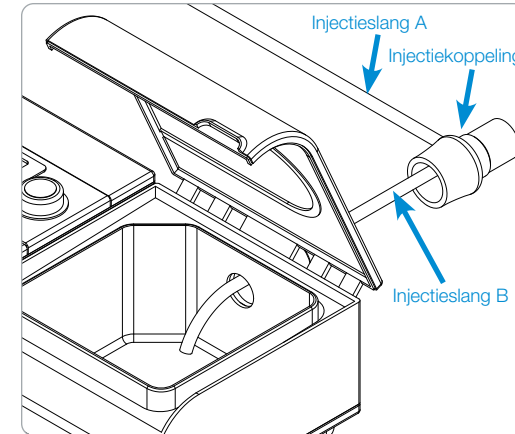

Figuur 2. Aansluiten van de injectiekoppeling

2. Gebruik van een adapter

Als uw PAP-machine een adapter nodig heeft, raadpleeg dan de instructies voor het monteren van de adapter en ga verder met stap 5.

3. Aansluiten van de injectiekoppeling

De injectiekoppeling verbindt de SoClean met uw PAP-machine. Eenmaal geïnstalleerd, hoeft u de injectiekoppeling niet meer los te koppelen om uw PAP te gebruiken. De SoClean is bedoeld om continu verbonden te blijven met uw PAP.

Opmerking: Uw PAP-reservoirmodel vereist mogelijk aanvullende configuratieprocedures of een adapter. Als u moeite heeft met de stappen in deze handleiding, raadpleeg dan: **SoClean.com** voor informatie over verschillende modellen.


Met luchtbevochtiger:

1. Plaats de injectiekoppeling op de poort van uw luchtbevochtiger (waar uw PAP-slang was aangesloten), zodat de kleinere Injectieslang B in het reservoir kan komen (figuur 2). Het uiteinde van de slang moet over de verwarmingsplaat worden geplaatst.
2. Indien nodig kunt u de Injectieslang B voorzichtig in stappen tot de juiste lengte knippen zodat deze over de verwarmingsplaat steekt.


Opmerking: De SoClean desinfecteert uw apparatuur met of zonder water in het reservoir. De SoClean zuivert het water alleen als het uiteinde van de injectieslang onder het waterniveau zit.

Voor extra hulp bij het aansluiten op uw specifieke machine, kunt u onze ondersteuningspagina's bezoeken op:

SoClean.com

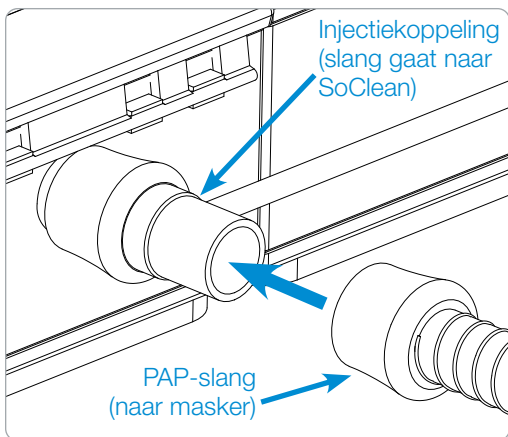

Figuur 3. De PAP-slang aansluiten op de injectiekoppeling

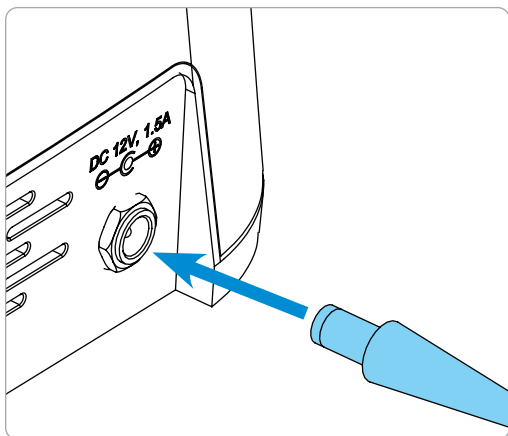

Figuur 4. Stroom aansluiten

Zonder bevochtiger:

1. Trek de kleine injectieslang B van de binnenkant van de injectiekoppeling af.
2. Bevestig de injectiekoppeling direct op uw PAP-machine.
3. Sluit nu uw PAP-slang weer aan op het einde van de injectiekoppeling.

! WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de zwarte injectieslang aan de achterkant van de SoClean is aangesloten op uw PAP voordat u uw SoClean-apparaat gebruikt.

Opmerking: Als u moeite heeft om verbinding te maken met uw PAP, kan een extra onderdeel nodig zijn. Neem contact op via **SoClean.com**.

4. De PAP-slang aansluiten

Ongeacht uw luchtbevochtiger kunt u nu uw PAP-slang aansluiten op het einde van de injectiekoppeling die is aangesloten op uw PAP-machine (figuur 3).

5. Stroom aansluiten

Steek op de achterkant van het SoClean-apparaat de AC-adapter in de aansluiting met de aanduiding DC 12 V, 1,5 A.

De AC-adapter moet worden aangesloten op een stopcontact dat eenvoudig te bereiken en zichtbaar is. (figuur 4).

! WAARSCHUWING: Zorg in het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

6. Uw PAP-apparaat opnieuw aansluiten

U kunt het masker nu opnieuw bevestigen aan het uiteinde van de PAP-slang.

ONDERSTEUNDE PAP-MACHINES EN ADAPTERS

De volgende PAP-machines hebben adapters van SoClean.




Ga om te bestellen naar: uw erkende verkoper of **SoClean.com**.

Fabrikant	Model	Ond.nr.
Fisher & Paykel	Pictogram	PNA1100i
	SleepStyle 600-serie	PNA110i-600
Philips Respironics	DreamStation	PNA1410
	PR System One REMstar 60-serie	PNA1410
	PR Systems One REMstar	PNA1410
	DreamStation Go	PNA1214
ResMed	S9	PNA1109
	AirSense10	PNA1210
	AirMini	PNA1214
Transcend & Z1	Werkt met alle modellen	PNA1213

*Opmerking: Deze lijst en de beschikbaarheid van de adapters is gebaseerd op oktober 2018. Als er PAP-apparatuur is die een adapter nodig heeft die hier niet vermeld wordt, raadpleeg dan **SoClean.com** of neem contact op met uw erkende verkoper.

SoClean is een onafhankelijk bedrijf dat geen banden heeft met Aeiomed, Apex Medical, Carefusion, Fisher & Paykel, Philips Respironics, PMI Probasic, Puritan Bennett, RESmart, ResMed of Transcend. Namen en bijbehorende handelsmerken zijn uitsluitend het eigendom van de respectievelijke bedrijven en fabrikanten. Afbeeldingen van merklogo's op onze website zijn alleen voor informatieve en educatieve doeleinden en worden gebruikt voor de herkenning van de apparatuur door de klant. Wij zijn niet aangesloten bij of onderschreven door een fabrikant van PAP-apparatuur.

TAAL INSTELLEN

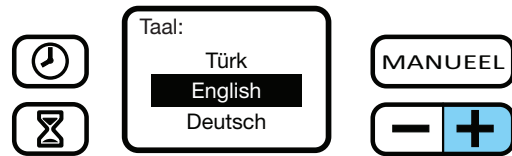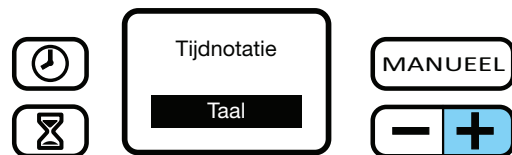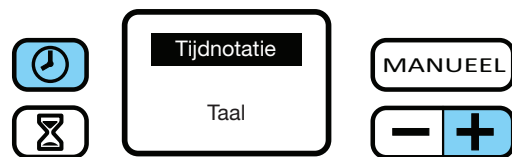

Taal

Om de juiste taal te kiezen:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen en .
2. Kies "Taal" met behulp van de knop .
3. Nadat u "Taal" heeft geselecteerd, druk op de knop .
4. Blader door de taalopties met behulp van de knop .
5. Druk op de knop om de gewenste taal te selecteren.
6. Druk op de knop om op te slaan.

TAAL, KLOK EN DESINFECTIESCHEMA INSTELLEN




WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Let in het bijzonder op de uurinstelling bij gebruik van de 12-uurs modus. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.



WAARSCHUWING: Zorg in het geval van stroomuitval in uw huis of van het SoClean-apparaat ervoor dat de juiste kloktijd en cyclusstarttijd zijn ingesteld voordat u uw PAP-machine gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het SoClean-apparaat op een onverwacht tijdstip in werking treedt.

Als u de stekker van de SoClean uit het stopcontact trekt of wanneer er een stroomstoring optreedt, hoeft u alleen de huidige tijd opnieuw in te stellen. De desinfectie-instellingen blijven opgeslagen. Voor veilig gebruik raden we aan om uw SoClean alleen volgens de instructies in deze handleiding te gebruiken.

Met uw SoClean-timer kunt u uw dagelijkse desinfectie volledig automatiseren na aansluiting op uw PAP. De SoClean is ingesteld om dagelijks om 10 uur 's ochtends een desinfectiecyclus van 7 minuten uit te voeren. **U moet de klok echter op uw huidige tijd instellen.** De volgende procedures beschrijven hoe u de klok kunt instellen, de dagelijkse desinfectie kunt plannen en direct een desinfectiecyclus kunt starten.

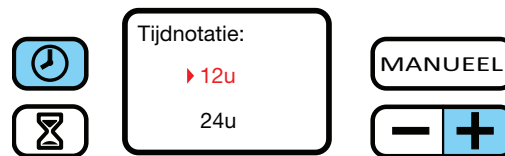



De klok instellen

1. Druk op de knop .
2. U kunt de tijd veranderen door op de knop of te drukken totdat uw huidige tijd verschijnt. Door de knop ingedrukt te houden, gaat de tijd sneller. Druk nogmaals op de knop om uw tijd op te slaan en terug te keren naar het beginscherm.

24-uurs klok

Voor weergave in 24-uurs notatie:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen en .
2. Druk nadat u "Tijdnotatie" heeft geselecteerd op de knop .
3. Kies de 12- of 24-uurs notatie met behulp van de knop .
4. .
5. Druk op de knop om op te slaan.

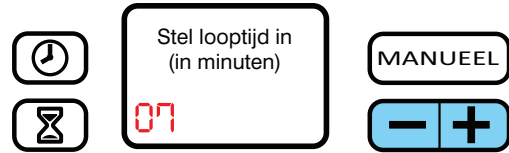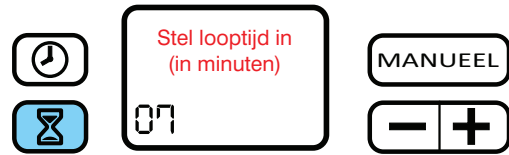

Cyclusduur/dagelijks desinfectieschema instellen

Deze twee processen volgen elkaar op in deze instelling.

1. Druk op de knop .
2. Druk op de knop of om het aantal minuten van uw cyclustijd te verkleinen of te vergroten.

Opmerking: Een looptijd van 5 tot 12 minuten zou uw PAP-apparatuur volledig moeten desinfecteren. Als u zich in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid en temperatuur bevindt, kan een langere desinfectiecyclus noodzakelijk zijn.

3. Druk nogmaals op de knop om de duur van uw cyclus op te slaan en de starttijd van de cyclus te plannen. Om de starttijdstelling over te slaan, drukt u nogmaals op de knop wanneer u deze stap bereikt.

4. Druk op de knop of om de gewenste starttijd te bereiken. Druk nogmaals op de knop om op te slaan en terug te keren naar het beginscherm.

Opmerking: Plan een starttijd ten minste twee uur voor het gebruik van de PAP-machine. De gehele desinfectiecyclus duurt twee uur plus de desinfectietijd. Een groen cyclusindicatielampje betekent dat de cyclus voltooid is.



Handmatige modus

Voor onmiddellijke desinfectie van uw apparatuur. De geautomatiseerde dagelijkse desinfectie wordt nog steeds uitgevoerd als uw PAP-apparatuur in de desinfectiekamer is geplaatst.

Zorg ervoor dat uw PAP-apparatuur op zijn plaats zit en dat het SoClean-deksel gesloten is.


1. Druk op de knop om de desinfectiecyclus te starten.

De desinfectiecyclus start onmiddellijk en loopt gedurende de ingestelde cyclustijd.

Net zoals bij de normale desinfectieprocedure, dient u op het groene licht te wachten voordat u uw masker verwijdert. Het is niet nodig om uw masker onmiddellijk nadat het lampje groen wordt te verwijderen.

GEBRUIK VAN UW SOCLEAN

Na de installatie is het gebruik van uw SoClean-apparaat zeer eenvoudig. Na het volgen van de aansluitingsprocedure op pagina 12 reinigt uw SoClean uw PAP-apparatuur dagelijks.

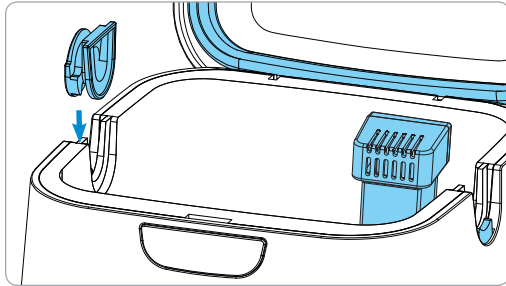

Figuur 6. Installeer de verwijderbare stop

! WAARSCHUWING: Wijzig de slangdetectieschakelaar van uw SoClean-apparaat niet fysiek. Inspecteer de slangdetectieschakelaar regelmatig op schade of de onmogelijkheid om omhoog/omlaag te bewegen. Als de slangdetectieschakelaar op uw SoClean-apparaat uitvalt, kan de SoClean op een onverwacht tijdstip in werking treden.

1. Open het deksel.
2. Plaats de verwijderbare slangopeningstop in een van de openingen (figuur 6).

Plaats de verwijderbare slangopeningstop zoals is weergegeven in figuur 6. De ronde kant van de verwijderbare slangopeningstop bevindt zich buiten het SoClean-apparaat.

Opmerking: Uw masker en slang kunnen langs beide zijden van de SoClean worden ingevoerd. Verwijder de verwijderbare slangopeningstop door deze er simpelweg uit te trekken en steek deze in de opening aan de andere kant.

3. Verwijder de plasticfolie van het patroonfilter en plaats deze volledig in de sleuf voor het patroonfilter in de desinfectiekamer.


4. Plaats uw masker in de desinfectiekamer zodat de aangesloten PAP-slang in de slangopening kan rusten, tegenover de verwijderbare slangopeningstop (figuur 7).

5. Sluit het deksel met de slang in de opening (figuur 8). De SoClean werkt nu automatisch volgens de ingestelde tijd en duur.


Opmerking: De SoClean functioneert niet zonder het masker en de slang in de afgesloten desinfectiekamer. Verder werkt de SoClean niet als de verwijderbare slangopeningstop ontbreekt of niet goed zit.

! WAARSCHUWING: Houd het SoClean-deksel gesloten totdat het groene statuslampje brandt (ongeveer 2 uur na voltooiing van de desinfectiecyclus). Het is noodzakelijk om het masker minstens 2 uur in de gesloten desinfectiekamer te laten, om ervoor te zorgen dat de ozon zijn uitwerking heeft en op de juiste wijze wordt afgevoerd. Na die periode brandt het statuslampje groen en is het masker klaar om uit de desinfectiekamer te worden verwijderd. Ozon verdwijnt snel in een normale atmosfeer. Als u per ongeluk de desinfectiecyclus onderbreekt en er ozon vrijkomt door de desinfectiekamer te openen voor het einde van de desinfectiecyclus, stap dan gewoon weg van het SoClean-apparaat om onbedoelde blootstelling te voorkomen.

Tip: De SoClean reinigt uw apparatuur met of zonder water in het reservoir. De SoClean zuivert het water alleen als het uiteinde van de injectiekoppeling B onder het waterniveau zit.

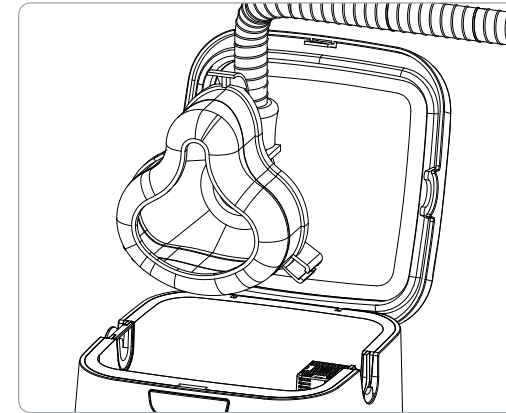

Figuur 7. Het PAP-masker in de desinfectiekamer plaatsen

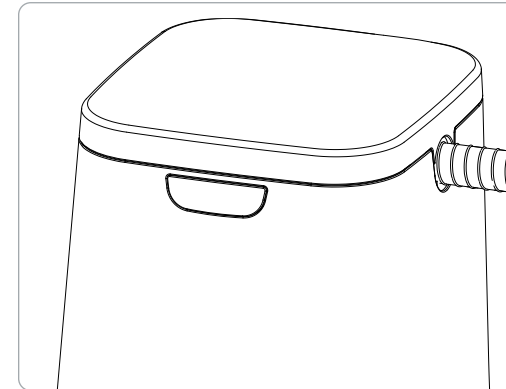

Figuur 8. Gesloten deksel met PAP-masker erin

6. Zodra de cyclus is voltooid (het indicatorlampje is groen), opent u het deksel en verwijdert u het PAP-masker. Verwijder de verwijderbare stop en plaats deze in de SoClean-desinfectiekamer.

Tip: Het plaatsen van de verwijderbare stop in de desinfectiekamer helpt voorkomen dat de verwijderbare stop per ongeluk verloren gaat.

! WAARSCHUWING: Ozon is een gasvormig desinfectiemiddel dat op natuurlijke wijze afbreekt nadat het is gevormd. De SoClean is ontworpen om ozon veilig in het systeem in te sluiten en heeft een katalysatorpatroonfilter in de desinfectiekamer om ozon weer om te zetten in zuurstof. In zeldzame gevallen kunnen mensen met ademhalingsgevoeligheden last hebben van irritatie. Mocht dit gebeuren, beëindig dan het gebruik en neem contact op met SoClean.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN UW SOCLEAN-APPARAAT

Veeg het SoClean-apparaat af met een vochtige doek. Het neutraliserende voorwasmiddel (niet in alle landen verkrijgbaar) mag alleen worden gebruikt met uw PAP-apparatuur.

Het SoClean-apparaat niet in water onderdompelen of vullen met water!

De terugslagklep en het patroonfilter van de SoClean moeten elke 6 maanden vervangen worden. Afhankelijk van het gebruik, wordt er na ongeveer zes maanden een herinneringsbericht weergegeven op het display.

Als u benodigdheden (patroonfilter, terugslagklep of neutraliserend voorwasmiddel) wenst bij te bestellen, kunt u contact opnemen met uw erkende verkoper of een bezoek brengen aan **SoClean.com** en zoeken naar het gewenste onderdeel.

Als de SoClean is gevallen of zichtbaar is beschadigd, of als er scheuren in de slang of behuizing worden opgemerkt, stop dan met het gebruik van de SoClean en neem contact op met de klantenservice.



Koop uw patroonfilterpakketten alleen bij SoClean®. Originele patroonfilterpakketten kunnen worden gekocht bij SoClean via online marktplaatsen als Amazon® en eBay®, in aanvulling op SoClean.com. Verzeker u ervan dat de verkoper van uw patroonfilterpakket SoClean is, en niet een andere verkoper, om de echtheid van uw patroonfilterpakket te garanderen. SoClean heeft ontdekt dat er vervalste patroonfilterpakketten worden verkocht, met name op Amazon® en eBay®, met terugslagkleppen en filters die lekken en schade kunnen veroorzaken aan uw SoClean-apparaat of aan uw eigendommen. Neem onmiddellijk contact op met SoClean als u problemen hebt gehad met uw patroonfilterpakket.

Amazon® is een geregistreerd handelsmerk van Amazon Technologies, Inc. eBay® is een geregistreerd handelsmerk van eBay, Inc. SoClean® is een geregistreerd handelsmerk van SoClean, Inc.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wordt mijn PAP-apparatuur nat van de SoClean?

Nee, de SoClean vernietigt 99,9% van PAP-ziektekiemen en bacteriën met ozon. Tijdens dit proces worden er geen vloeistoffen of water gebruikt. Restwater in het reservoir wordt gedesinfecteerd, zoals is beschreven op pagina 20, zolang de injectiekoppeling B in water is ondergedompeld.

2. Is de SoClean schadelijk voor mens of milieu? Nee, de SoClean vernietigt 99,9% van PAP-ziektekiemen en bacteriën met ozon. Deze technologie wordt gebruikt op groenten, fruit en drinkwater. De SoClean produceert ozon in een gesloten systeem. De ozon desinfecteert uw apparatuur en breekt op natuurlijke wijze binnen twee uur volledig af tot gewone zuurstof. Bovendien zet het meegeleverde patroonfilter ozon weer om in gewone zuurstof.

3. Hoe weet ik dat mijn SoClean goed werkt? Nadat de desinfectiecyclus succesvol is afgerond, brandt het statusindicatorlampje groen. Uw PAP-apparatuur heeft een lichte, schone geur.

4. Wat als ik de geur die de SoClean achterlaat te sterk vind? Was uw apparatuur met het neutraliserende voorwasmiddel (niet in alle landen verkrijgbaar) en niet met geparfumeerde zeepproducten (beschreven op pagina 12). Deze producten kunnen reageren op het oxidatieproces en ongewenste geuren produceren. Als de geur sterk blijft, kunt u een van deze stappen proberen: **(1)** Voordat u uw masker opdoet voor het slapengaan, kunt u uw PAP 20 seconden laten werken om een mogelijke geur weg te blazen. **(2)** Plan de machine om vroeger op de dag te werken, zodat eventuele restgeur 's avonds is verdwenen. **(3)** Verhoog de cyclustijd tot 12 minuten gedurende enkele dagen. Een sterke geur kan wijzen op een hoge hoeveelheid geoxideerde organische stoffen, zoals geurend wasmiddel. Een langere cyclus kan deze organische stoffen volledig verwijderen. U kunt de cyclus weer verkorten als dit helpt de geur te verminderen.

5. Wat moet ik doen als mijn indicatorlampje rood of geel wordt? Dit betekent dat de desinfectiecyclus nog niet is afgerond. Wacht tot het lampje groen wordt om uw PAP-apparatuur uit de SoClean-desinfectiekamer te verwijderen. (Zie pagina 9).

6. Het is meer dan twee uur geleden dat de SoClean een cyclus voltooide, maar het indicatorlampje is nog steeds geel. Waarom? Sommige soorten binnerverlichting maken het moeilijk om de gele en groene lichten op de SoClean te onderscheiden. Controleer of er groen licht zichtbaar is voordat u uw SoClean opent, om er zeker van te zijn dat er een cyclus is voltooid en dat uw PAP-apparatuur is gedesinfecteerd en klaar voor gebruik. In dit geval kunt u het deksel openen.

7. Wat moet ik doen als het indicatorlampje uit is na een geplande desinfectietijd? De SoClean is groen wanneer een desinfectiecyclus succesvol is voltooid. Als het lampje uit is, is de cyclus niet gestart.

Vaak voorkomende redenen hiervoor zijn dat het deksel niet goed is afgesloten, dat er geen masker in de desinfectiekamer zat tijdens de desinfectietijd of dat de verwijderbare stop ontbreekt of niet goed zit (zie pagina 20). Als alles er goed uitziet, sluit dan het deksel en druk op de knop **(MANUEEL)** om te testen. Eventuele foutmeldingen worden weergegeven op het scherm (zie pagina 9 voor foutmeldingen).

8. Wat als ik de geplande desinfectietijd heb gemist, maar ik toch mijn apparatuur wil desinfecteren? U kunt de handmatige functie gebruiken om een cyclus uit te voeren. (Zie pagina 19).

9. Waarom zegt mijn display: filterpakket bestellen?

Dit bericht wordt ongeveer om de 6 maanden weergegeven, afhankelijk van het gebruik, als herinnering om regelmatig het patroonfilter en de terugslagklep te vervangen. Deze onderdelen slijten door regelmatig gebruik. U kunt het patroonfilter en de terugslagklep samen kopen in een patroonfilterpakket (PN1207). Om bij te bestellen, kunt u contact opnemen met uw erkende verkoper of een bezoek brengen aan **SoClean.com**.

10. Zijn er materialen die ik niet in de SoClean mag stoppen? Het SoClean-apparaat is ontworpen om alleen uw PAP-apparatuur te desinfecteren. Nylon en natuurlijk rubber breken af wanneer ze aan ozon blootgesteld worden. Over het algemeen gebruiken de PAP-fabrikanten deze materialen niet in hun reservoirs, slangen, maskers of hoofddeksels. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw PAP-fabrikant, leverancier of SoClean.

11. Mijn masker voelt vettig aan, wat moet ik doen?

De chemie van de huid is uniek. Sommige mensen met een vette huid moeten het masker af en toe met de hand wassen. Als u uw masker met de hand wast, gebruik dan het neutraliserende voorwasmiddel of een geur- en kleurstofvrij afwasmiddel.

12. Hoe vaak moet ik mijn PAP-apparatuur wassen?

PAP-apparatuur moet regelmatig worden gewassen met het meegeleverde neutraliserende voorwasmiddel of een geur- en kleurstofvrij afwasmiddel.

Voor verdere vragen of zorgen, bezoek onze website: **SoClean.com**.

Ga voor informatie over garantie naar **SoClean.com/warranty**.

UW GEZONDHEID EN OZONVEILIGHEID

Voorzorgsmaatregelen voor een doeltreffend gebruik van de SoClean

- Geactiveerde zuurstof, de triatomische vorm van zuurstof (O₃), staat bekend als ozongas.
- Ozon is een effectief onzichtbaar desinfectiemiddel.
- SoClean gebruikt ozon voor het desinfecteren van apparatuur die gebruik maakt van positieve luchtdruk; ozon komt alleen in contact met de PAP-apparatuur, niet met de gebruiker.
- SoClean is ontworpen om de ozonproductie voldoende te beheersen om uw PAP-apparatuur te desinfecteren en overmatige blootstelling te beperken.
- Hoewel het inademen van grote hoeveelheden ozon de ademhaling van mensen en huisdieren kan irriteren, zorgt het volgen van de gebruiksaanwijzing ervoor dat SoClean-gebruikers geen grote hoeveelheden ozon inademen.
- De geur van ozon is bij lage concentraties door sommige mensen waarneembaar. De geur van ozon heeft de eigenschap van een zoete chloorachtige geur. Als er een sterke ozongeur wordt gedetecteerd wanneer de SoClean werkt volgens de gebruiksaanwijzing, controleer dan op zichtbare schade, zoals scheuren in de behuizing of slangaansluitingen.
- Personen met chronische of acute ademhalingsproblemen zoals astma, bronchitis, verkoudheid, griep en geïrriteerde ademhalingswegen (mond, neus, keel) moeten hun arts raadplegen over het gebruik van dit product.
- Ozon verdwijnt snel in een normale atmosfeer. Als u per ongeluk de desinfectiecyclus onderbreekt en er ozon vrijkomt door de desinfectiekamer te openen voor het einde van de desinfectiecyclus, stap dan gewoon weg van het SoClean-apparaat om onbedoelde blootstelling te voorkomen.
- Net als zuurstof versnelt ozon de verbranding. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, vonken en open vuur.
- Gebruik de producten alleen op de manier zoals is beschreven in de gebruikershandleiding. Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de apparatuur geboden veiligheidsbescherming worden aangetast.
- Als de SoClean is gevallen of zichtbaar is beschadigd, of als er scheuren in de slang of behuizing worden opgemerkt, stop dan met het gebruik van de SoClean en neem contact op met SoClean.
- Als u ozon ruikt en denkt dat het SoClean-apparaat niet goed werkt, schakel dan de stroomtoevoer naar het apparaat uit en neem contact op met SoClean.



SoClean.com



00800 5558 8811

CLASSIFICATIE, SYMBOLEN, FCC-KENNISGEVING

Classificatie

US FDA klasse I volgens 21 CFR § 880.6890 - Desinfectiemiddelen voor algemene doeleinden.
EG/EU MDD-klasse IIa volgens 93/42/EEG Bijlage IX Voorschrift 15 - Specifieke desinfectie-, reinigings- en spoelmiddelen.

Symbolen

	Handleiding raadplegen		Serienummer		Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om zich van deze apparatuur op een aangewezen inzamelpunt te ontdoen.
	Voldoet aan de "Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen" van de Europese Unie.		Fabrikant JDI Electronics Factory Sima Industrial Zone, Sima Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523570		
	Productiedatum		Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Niet gemaakt van natuurrubber - latex
					Catalogus-nummer

FCC-kennisgeving

Merk op dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 18 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze apparatuur produceert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker verzocht om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Ga voor meer informatie
over SoClean 2
of onze andere
innovatieve producten
naar:

SoClean.com



00800 5558 8811

Copyright © 2011-2018

SoClean® is een geregistreerd
handelsmerk van SoClean, Inc.

Peterborough, NH VS 03458

Patent: SoClean.com/patents